


Schablone Kopfbreite / Bügellänge

Achten Sie beim Drucken auf einen Maßstab von 1:1, Vergleich das Maß der Bügelschablone vom Nullpunkt (Knick) bis 160 entspricht 160mm.

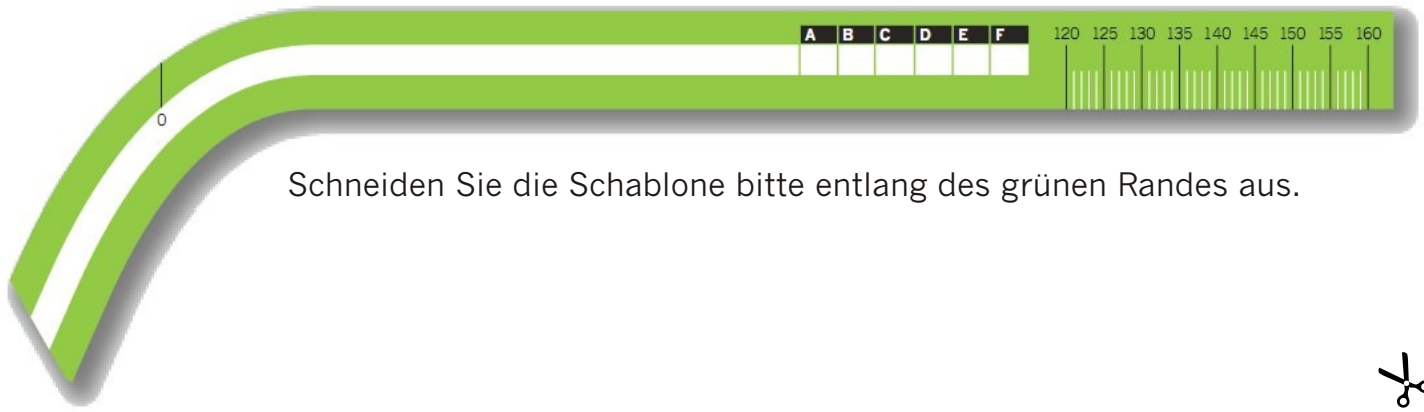

Schneiden Sie die Schablone bitte entlang des grünen Randes aus.



KOPFBREITE



Um Ihre Kopfbreite zu messen, benötigen Sie Ihre bisherige bequeme Brille und die ausgeschnittene Bügelschablone. Legen Sie die Brille aufgeklappt vor sich. Messen Sie mit der Schablone den Abstand zwischen beiden Bügeln an der breitesten Stelle (meist in der Mitte der Bügel).


BÜGELLÄNGE

Legen Sie den Bügel Ihrer bequemen Brille auf das weiße Feld der Schablone (im Knick bündig). Notieren Sie den Buchstaben, den Sie auf Höhe der Bügelschraube ablesen.



Wenn Sie keine bequeme Brille haben, legen Sie die ausgeschnittene Bügelschablone hinter Ihr Ohr. Das kurze Ende muss gut hinter dem Ohr anliegen, so wie später einmal der Brillenbügel. Markieren Sie jetzt den Buchstaben an der Schablone auf Höhe Ihrer Nasenwurzel.

Schablone Augenabstand / Pupillendistanz

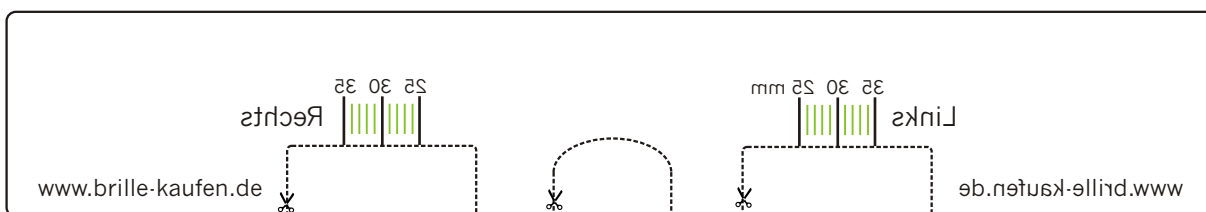

Schneiden Sie den Maßstab aus (wichtig die gestrichelten Felder ausschneiden). Stellen Sie sich vor den Spiegel, legen den Maßstab auf die Nase und schauen sich in die Augen. Lesen Sie jetzt an der Scala Ihre Pupillenmitte für rechts und links ab.

09350 Lichtenstein, Schlossgasse 2

Telefon 037204 89888
WWW.BRILLE-KAUFEN.DE

brille-kaufen.de

Schöne Brillen. Günstig